




# iD Slim

*Η νέα εποχή στο αδυνάτισμα  
Λιποδιάλυση με Laser 1060nm*

- 25' λεπτά θεραπεία
- 24% μείωση των λιποκυττάρων τοπικά
- 0% χρόνος αποθεραπείας
- Hands free
- Χωρίς αναλώσιμα

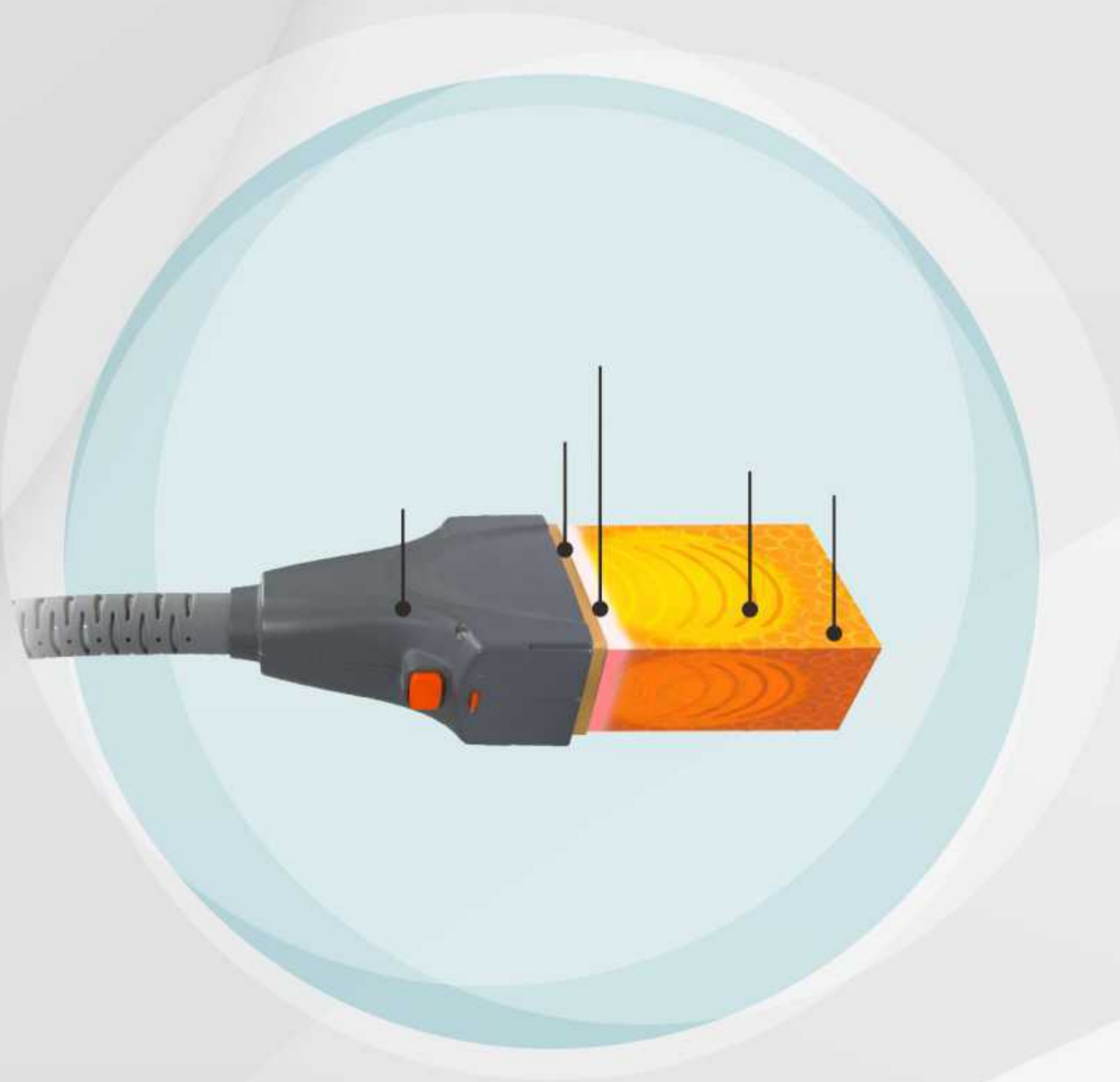



## Η νέα εποχή στο αδυνάτισμα Λιποδιάλυση με Laser 1060nm

**Μη επεμβατική λιποδιάλυση με Laser 1060nm  
Για δύσκολες περιοχές με επίμονο τοπικό πάχος  
Το περίγραμμα του σώματος αναδιαμορφώνεται  
Οριστική αντιμετώπιση του τοπικού λίπους από την πρώτη συνεδρία  
Χωρίς πόνο  
Χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια για το δέρμα**

Η Θερμολιπόλυση εγκαινιάζει τη νέα εποχή στις θεραπείες λιποδιάλυσης και αδυνατίσματος αξιοποιώντας την υψηλή τεχνολογία Laser σε μήκος κύματος 1060nm.

Το **Laser iD-Slim 1060nm** παρουσιάζει επιλεκτική απορρόφηση της ενέργειας αποκλειστικά από το λιπώδη ιστό με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας των λιποκυττάρων στους 42-47°C, τη μόνιμη καταστροφή τους και τη σταδιακή αποβολή τους μέσω της λεμφικής οδού (απόπτωση) σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Δεν επηρεάζεται το χόριο και οι περιβάλλοντες ιστοί. Η χρήση θερμικής ενέργειας διεγείρει τους ινοβλάστες με παράλληλο όφελος τη σύσφιγξη του δέρματος στην υπό θεραπεία περιοχή.

Προηγμένο σύστημα Contact Cooling παρέχει διαρκή ψύξη (-15°C) της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κάνοντας τη θεραπεία άνετη και ανώδυνη.

Διαθέτει 4 κεφαλές με επίπεδο σχεδιασμό που λειτουργούν χωρίς αναρρόφηση, επιτυγχάνοντας ομοιόμορφο και φυσικό αποτέλεσμα, αποτρέποντας τον κίνδυνο χαλάρωσης του δέρματος. Παρέχουν μεγάλη ευελιξία κατά την εφαρμογή καθώς προσαρμόζονται σε όλους τους τύπους σώματος και υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής σε έως και 4 διαφορετικές περιοχές.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά και μετρήσιμα μέσα σε 4 εβδομάδες και μπορεί να γίνει αξιολόγηση με λιπομέτρηση.


specifications

Wavelength	1060nm
Applicator	4
Applicator size	4*8cm
Pulse mode	CW pulse mode
Power output	60W per diode (total 60*4 240W)
Power density	1.0-1.6W/cm <sup>2</sup>
Operate Interface	9.7" True color touch screen
Cooling system	Air & super cooling system
Power supply	AC110V or 230V, 50/60Hz
Dimensions	64*52*110cm (L*W*H)
Weight	60kgs




1.

Το μήκος κύματος 1060nm απορροφάται επιλεκτικά από το λιπώδη ιστό και δεν επηρεάζει το χόριο ή τους γύρω ιστούς

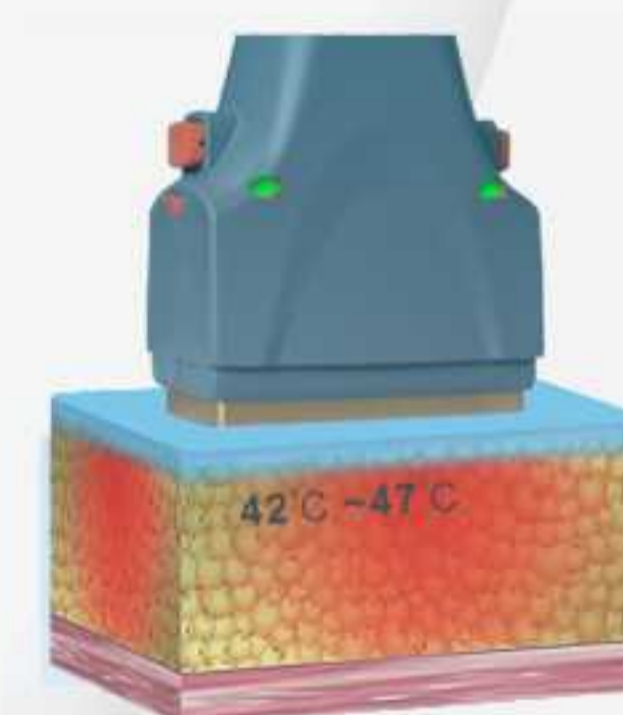


2.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των λιποκυττάρων στους 42-47°C οδηγεί σε απόπτωση

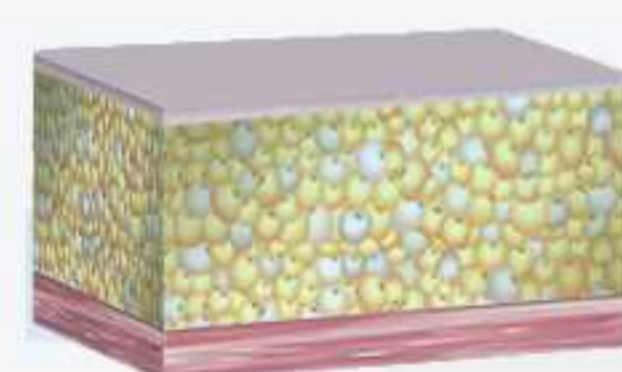

3.

Τα κατεστραμμένα λιποκύτταρα αποβάλλονται φυσικά μέσω της λέμφου

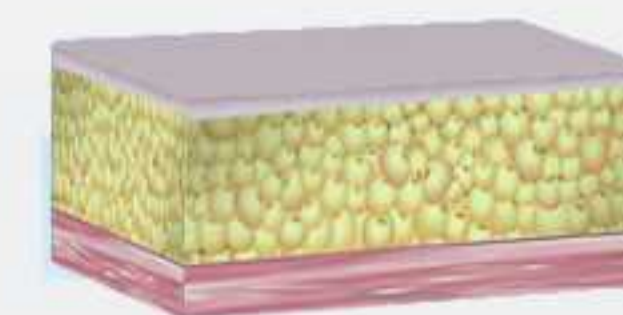

4.

Τα λιποκύτταρα που υποβλήθηκαν σε θερμολιπόλυση καταστρέφονται οριστικά και δεν αναγεννώνται